

## Compressa de Gaze Hidrófila Prime em Rolo

**DESCRIÇÃO:** A Compressa de Gaze Hidrófila Prime em Rolo – Não Estéril são elaboradas com fios 100% algodão de alta qualidade, em tecido tipo tela com alto poder de absorção. São isentas de substâncias gordurosas, amido, dextrina, corantes corretivos e impurezas.

**INDICAÇÕES:** São indicadas para absorção de sangue e secreções líquidas, e larga utilização em curativos. Indicadas para procedimentos médico-hospitalar ou de enfermagem.



**APRESENTAÇÃO:** A Compressa de Gaze Hidrófila Prime em Rolo é apresentada em bobinas com 91 m de comprimento e 91 cm de largura. São apresentadas nas versões de 13 fios/cm<sup>2</sup> e 18 fios/cm<sup>2</sup>. São uniformemente enroladas sobre si e embaladas individualmente em saco plástico, com 03 dobras e 08 camadas.

CÓDIGO Faturamento	DIMENSÕES (Larg X Comp)	Fios/cm <sup>2</sup>	CAIXA DE EMBARQUE		
			Nº de Embalagens / CX	Unidades/ Embalagem	Nº de Unidades Total / CX
82880	91cm X 91m	13	14	01	14
82881	91cm X 91m	18	14	01	14

**PRAZO DE VALIDADE:** 05 anos a partir da data de fabricação do produto.

#### **CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO.**

Só deverão ser utilizados os produtos que possuam suas respectivas embalagens integras, devendo ser descartado o uso daquelas cujas embalagens estejam abertas, danificadas ou violadas para que haja garantia na sua utilização. As precauções e cuidados especiais fazem parte da rotina adotada de procedimentos aos quais os profissionais de saúde estão aptos a realizar, quando se trata de materiais de uso em saúde. Observar sempre a data de validade do produto.

#### **PRECAUÇÕES**

Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Recomendamos esterilizar o produto antes do uso. A esterilização poderá ser feita em autoclave, óxido de etileno(gás) ou raios gama. Deve-se sempre observar a data de validade do produto a ser utilizado. Visando assegurar e garantir a qualidade e eficácia do produto, deve-se observar todos os cuidados referentes ao seu armazenamento.



## **ADVERTÊNCIAS**

PRODUTO DE USO ÚNICO - PROIBIDO REPROCESSAR - DESTRUIR APÓS USO.  
Não utilize o produto se a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida.

## **ESTERILIZAÇÃO**

Produto Não Estéril, podendo ser submetido a métodos de esterilização em autoclave a vapor, óxido de etileno ou raios gama.

## **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO.**

O produto deve ser armazenado nas seguintes condições:

- Temperatura ambiente, em local limpo, seco e arejado;
- Em locais onde o acesso de raios solares é restrito;
- Proteger contra danos físicos e intempéries.

Não há faixas de temperatura e umidade determinadas para o armazenamento do produto, sendo assim, o produto pode ser armazenado sem a necessidade de controle de temperatura e umidade, seguindo as recomendações citadas.

## **CONDIÇÕES PARA TRANSPORTE.**

Devem-se estabelecer critérios para assegurar o transporte seguro e adequado evitando trocas, avarias, deterioração ou outros efeitos adversos nos produtos nas seguintes condições:

- Conservação e limpeza do caminhão;
- Controle de pragas;
- Quantidade de volumes (empilhamento máximo das caixas de embarque).

Não há faixas de temperatura e umidade determinadas para o transporte Compressa de Gaze Hidrófila Prime em Rolo, sendo assim, o produto pode ser transportado sem a necessidade de controle de temperatura e umidade, seguindo as recomendações citadas.

## **ESTERILIZAÇÃO**

Recomenda-se esterilização quando o produto for utilizado em procedimentos cirúrgicos, ou curativos de feridas abertas.

## **DESCARTE**

O descarte do produto deve seguir Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, para manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme as diretrizes da Resolução RDC N° 222, de 28 de março de 2018 – que regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências.



## CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS	BENEFÍCIOS
ABNT NBR 14108:2017 RDC Nº 665/2022	Atendimento à Normas Técnicas e Regulamentos Garantindo excelência, padronização e qualidade.
<b>Isento de Amido</b>	Reduz o risco de infecção por não proporcionar meio de cultura microbiológica.
<b>Isento de Corantes Corretivos e Alvejantes Ópticos</b>	Não interfere no processo de cicatrização, e reduz risco de lesões cutâneas.
<b>100% Algodão</b>	Alto poder de absorção e excelente hidrofiliidade.
<b>Com 08 camadas, 03 dobras 09, 11, 13 Fios/cm<sup>2</sup></b>	Conferem maior poder de absorção
<b>Dobras para dentro em toda a sua extensão</b>	Minimiza chance de desfiamento, facilitando o uso e remoção.
<b>Não há interação com medicamentos</b>	Proporciona maior segurança ao paciente.

**FABRICANTE: ALPHMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.**

**Endereço:** Rod. Deputado Antônio Heil SC 486, n. 7180 – KM 21  
Bairro Limoeiro - Urbano – Brusque / SC – Brasil - CEP 88.352-502

**CNPJ:** 21.962.572/0001-21

**Fone:** (047) 3528-5028

**Home Page:** [www.alphmed.com.br](http://www.alphmed.com.br)

**Atendimento ao consumidor:** [sac@alphmed.com.br](mailto:sac@alphmed.com.br)

**AFE:** 8.28613-0

**COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA PRIME EM ROLO - Não Estéril**

“Detentor da Notificação” **ALPHMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.**

Número Notificação ANVISA: 82861300002

Processo: 25351.022424/2024-51

