

Compressa de Gaze Hidrófila Prime

DESCRIÇÃO: As Compressas de Gaze Hidrófila Prime – Não Estéril são elaboradas com fios 100% algodão de alta qualidade, em tecido tipo tela com alto poder de absorção. São isentas de substâncias gordurosas, amido, dextrina, corantes corretivos e impurezas.

INDICAÇÕES: São indicadas para absorção de sangue e secreções líquidas, em curativos ou para auxiliar na assepsia de pele. Indicadas para procedimentos médico-hospitalar, odontológico ou de enfermagem, sendo também utilizadas para remoção de maquiagem, esmaltes e higiene.



APRESENTAÇÃO: As Compressas de Gaze Não Estéril são cortadas e dobradas em tamanhos uniformes e pré-determinadas para o consumo com 08 camadas e cinco dobras e bordas devidamente voltadas para dentro para evitar desfiamento, e possuem várias versões em função do número de fios/cm². O número de fios confere poder de absorção. São acondicionadas em sacos plásticos devidamente selados e identificados.

CÓDIGO Faturamento	DIMENSÕES (Larg X Comp)	Fios/cm ²	CAIXA DE EMBARQUE		
			Nº de Embalagens / CX	Unidades/ Embalagem	Nº de Unidades Total / CX
82871	10cm X 10cm	09	20	500	10.000
82872	10cm X 10cm	11	20	500	10.000
82873	10cm X 10cm	13	20	500	10.000

PRAZO DE VALIDADE: 05 anos a partir da data de fabricação do produto.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO.

Só deverão ser utilizados os produtos que possuam suas respectivas embalagens integras, devendo ser descartado o uso daquelas cujas embalagens estejam abertas, danificadas ou violadas para que haja garantia na sua utilização. As precauções e cuidados especiais fazem parte da rotina adotada de procedimentos aos quais os profissionais de saúde estão aptos a realizar, quando se trata de materiais de uso em saúde. Observar sempre a data de validade do produto.

PRECAUÇÕES

Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Recomendamos esterilizar o produto antes do uso. A esterilização poderá ser feita em autoclave, óxido de etileno(gás) ou raios gama. Deve-se sempre observar a data de validade do produto a ser utilizado. Visando assegurar e garantir a qualidade e eficácia do produto, deve-se observar todos os cuidados referentes ao seu armazenamento.



ADVERTÊNCIAS

PRODUTO DE USO ÚNICO - PROIBIDO REPROCESSAR - DESTRUIR APÓS USO.
Não utilize o produto se a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida.

ESTERILIZAÇÃO

Produto Não Estéril, podendo ser submetido a métodos de esterilização em autoclave a vapor, óxido de etileno ou raios gama.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO.

O produto deve ser armazenado nas seguintes condições:

- Temperatura ambiente, em local limpo, seco e arejado;
- Em locais onde o acesso de raios solares é restrito;
- Proteger contra danos físicos e intempéries.

Não há faixas de temperatura e umidade determinadas para o armazenamento do produto, sendo assim, o produto pode ser armazenado sem a necessidade de controle de temperatura e umidade, seguindo as recomendações citadas.

CONDIÇÕES PARA TRANSPORTE.

Devem-se estabelecer critérios para assegurar o transporte seguro e adequado evitando trocas, avarias, deterioração ou outros efeitos adversos nos produtos nas seguintes condições:

- Conservação e limpeza do caminhão;
- Controle de pragas;
- Quantidade de volumes (empilhamento máximo das caixas de embarque).

Não há faixas de temperatura e umidade determinadas para o transporte das Compressas de Gaze Hidrófila Prime, sendo assim, o produto pode ser transportado sem a necessidade de controle de temperatura e umidade, seguindo as recomendações citadas.

ESTERILIZAÇÃO

As Compressas de Gaze Hidrófila Prime são fornecidas de forma não estéril, podendo ser esterilizada pelo serviço de saúde antes do seu uso, caso necessário, em autoclave, óxido de etileno e raio gama.

DESCARTE

O descarte do produto deve seguir Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, para manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme as diretrizes da Resolução RDC N° 222, de 28 de março de 2018 – que regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências.



CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS	BENEFÍCIOS
ABNT NBR 13843:2009 RDC Nº 665/2022	Atendimento à Normas Técnicas e Regulamentos Garantindo excelência, padronização e qualidade.
Isento de Amido	Reduz o risco de infecção por não proporcionar meio de cultura microbiológica.
Isento de Corantes Corretivos e Alvejantes Ópticos	Não interfere no processo de cicatrização, e reduz risco de lesões cutâneas.
100% Algodão	Alto poder de absorção e excelente hidrofiliidade.
Com 08 camadas, 05 dobras 09, 11, 13 Fios/cm ²	Conferem maior poder de absorção
Dobras para dentro em toda a sua extensão	Minimiza chance de desfiamento, facilitando o uso e remoção.
Não há interação com medicamentos	Proporciona maior segurança ao paciente.

FABRICANTE: ALPHMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

Endereço: Rod. Deputado Antônio Heil SC 486, n. 7180 – KM 21
Bairro Limoeiro - Urbano – Brusque / SC – Brasil - CEP 88.352-502

CNPJ: 21.962.572/0001-21

Fone: (047) 3528-5028

Home Page: www.alphmed.com.br

Atendimento ao consumidor: sac@alphmed.com.br

AFE: 8.28613-0

COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA PRIME - Não Estéril

“Detentor da Notificação” **ALPHMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.**

Número Notificação ANVISA: 82861300002

Processo: 25351.022424/2024-51

