

## Máscara Cirúrgica Tripla Camada Qualyflex Descartável - Não Estéril



AFE ANVISA: 8.28613-0			
REGISTRO ANVISA	82861300005	Código NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL)	6307.90.10

Dados do Fabricante:	<p><b>Razão Social:</b> ALPHMED PRODUTOS PARA SAÚDE</p> <p><b>Nome Fantasia:</b> ALPHMED.</p>
Nome do Produto:	Máscara Cirúrgica Tripla Camada Qualyflex Descartável – Não Estéril.
Indicação de Uso:	Indicado ao uso Odonto-Médico-Hospitalar para proteção das vias respiratórias com alta capacidade de ajuste facial de modo a prevenir a inalação de gotículas transmitidas a curta distância e pela projeção de outros fluidos corpóreos que possam atingir as vias respiratórias de profissionais de saúde, apoio e pacientes.
Precauções, Restrições e Advertências:	<p>Produto de uso único;</p> <p>Não reutilize a máscara.</p> <p>Substitua a máscara por uma nova assim que a mesma estiver úmida.</p> <p>Após uso, descarte em local apropriado e higienize as mãos.</p> <p>Condições impróprias de armazenamento podem reduzir o tempo de vida útil do produto.</p> <p>Proteja este produto do calor, umidade e luz.</p> <p>Se a integridade da máscara estiver comprometida (furos, ou rasgos) durante o uso ela deve ser substituída por outra.</p> <p>Descartar após o uso conforme NR vigente.</p> <p>Este produto não protege contra agentes químicos ácidos, líquidos quentes e ou na presença de chamas (fogo).</p>
Características do Produto:	<p>Tripla camada – 03 camadas.</p> <p>Produzida com tripla camada em TNT – Tecido Não Tecido 100% Polipropileno e Elemento Filtrante – EFP e BFE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eficiência Filtragem de Partículas (EFP) <math>\geq</math> 95%.</li> <li>- Eficiência Filtragem Bacteriológica (BFE) <math>\geq</math>95%.</li> <li>- Com Clipe Nasal.</li> <li>- Modelo com elástico.</li> <li>- Produto Atóxico.</li> <li>- <b>Solda ultrassônica.</b></li> <li>- Não Estéril.</li> </ul>
Dimensões (Em Centímetros):	<p>Largura: 9,5 cm.</p> <p>Comprimento: 17,5 cm.</p>



<b>Cores:</b>	Azul Claro   Azul Escuro   Azul Royal   Rosa   <b>Branco</b>   Verde   Preto   Vermelho   Roxo   Lilás   Amarelo   Cinza   Laranja.
<b>Validade:</b>	Vide informação na embalagem, 03 anos após data de fabricação.
<b>Modo de Uso:</b>	Colocar a máscara sobre o rosto, posicionar os elásticos atrás da parte posterior das orelhas, fixando a máscara cirúrgica ao rosto do usuário.
<b>Armazenamento e Transporte</b>	<p>As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade.</p> <p>A validade do produto estará assegurada enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto.</p> <p>Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.</p> <p>Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.</p>
<b>Forma de Apresentação:</b>	Embalado em caixas display contendo 50 unidades, garantindo a integridade do produto (embalagem primária), devidamente identificado, sendo posteriormente acondicionada em caixa de papelão embalagem secundária
<b>Esterilização:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Não
<b>Tipo de Embalagem:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Embalagem Plástica e ou <input checked="" type="checkbox"/> Embalagem caixa display

